

Häufig gestellte Fragen über die Salzpfeife:

Wozu dient das kleine Silikonventil auf der Salzpfeife?

Das kleine Silikonventil an der Spitze der Salzpfeife ist ein Rückschlagventil. Wenn die Luft nicht durch die Nase ausgeatmet, sondern in die Pfeife zurück gepustet wird, klappt das Ventil auf und verhindert, dass Feuchtigkeit in die Solepfeife eindringt.

Welche Bedeutung haben die verschiedenen Farben auf der Salzpfeife?

Die Farben sind auf Kundenwunsch entstanden, um sie unterscheiden zu können, wenn z.B. mehrere Solepfeifen in einer Familie in Gebrauch sind.

Wie lange kann die Salzpfeife benutzt werden und ist sie nachfüllbar?

Die Salzpfeife kann bei täglichem Gebrauch von 15-20 Minuten ca. 5 Jahre genutzt werden. Sie ist nicht nachfüllbar, nach 5 Jahren sollte eine neue gekauft werden.

Wechsel/Nebenwirkungen?

Die Solepfeife darf mit jedem Medikament zusammen genutzt werden, da sie nur natürliche Salzkristalle enthält, die aus verschiedenen Höhlen ausgewählt wurden. Es sind keinerlei Nebenwirkungen bekannt.

Darf die Salzpfeife bei Schilddrüsenerkrankungen oder Bluthochdruck genutzt werden?

Ja, da der Gebrauch der Salzpfeife keinerlei Auswirkungen darauf hat.

Dürfen schwangere Frauen die Salzpfeife benutzen?

Ja, alle können sie benutzen, da sie ausschließlich ein natürliches Salzkristallgemisch enthält.

Was ist der Unterschied zwischen den Erwachsenen- und den Kindersolepfeifen?

Der Unterschied ist nur die Optik/Form.

Wie alt muss man sein um die Salzpfeife benutzen zu dürfen?

Da es keine Nebenwirkungen gibt, gibt es auch keine Altersbeschränkung. Kinder sollten aber in der Lage sein, selbstständig durch die Salzpfeife ein- und durch die Nase wieder auszuatmen.

Warum muss man durch die Nase ausatmen?

Um alle Bereiche unseres Atmungssystems zu erreichen, z.B. die oberen Atemwege und die Nebenhöhlen. Außerdem bleibt so die Salzpfeife vor Feuchtigkeit geschützt.

Was ist beim ersten Gebrauch der Salzpfeife zu beachten?

Beim erstmaligen Inhalieren durch die Salzpfeife ist ein etwas stärkerer Salzgeschmack zu spüren. Auch kommt es häufig zu einem verstärkten Hustenreiz. Dies ist durch das Lösen alter Ablagerungen und Verschleimungen bedingt und wird nach einigen Tagen deutlich reduziert.

Wie kann man die Salzpfeife reinigen?

Nur mit einem feuchten Tuch von der Außenseite vorsichtig reinigen, darauf achten, dass keine Feuchtigkeit eindringt.

Wie soll die Salzpfeife gelagert werden?

Die Salzpfeife kann überall gelagert wo nur geringe Luftfeuchtigkeit herrscht. Die Lagerung im Bad oder in der Küche ist nicht ratsam.

Ersetzt die Salzpfeife den Gebrauch von anderen Medikamenten?

Viele Patienten können durch die Salzpfeifentherapie auf ihre Medikamente verzichten. Grundsätzlich wird die Salzpfeife aber zusätzlich zu der Schulmedizin als Ergänzungstherapie angeboten.